

# Protocolo para exames Endoguide 3D

Leia atentamente todas informações, qualquer dúvida nos contacte.



## Tomografia Computadorizada

### • Observações Gerais:

Tomografia com uso de Arcflex, um afastador de lábio, língua e dentes. Sempre do arco completo na melhor resolução. Escaneamento intra-oral de arco completo . Áreas posteriores atenção a abertura de boca. Profundidade máxima da calcificação 13mm. Local de luz visível deve ter no mínimo 3mm de diâmetro de raiz em corte axial, na menor medida do diâmetro.



## Escaneamento Intraoral

- Sempre pegar todo o arco;
- Em caso de maxila é necessário escanear o palato.

## Como solicitar Planejamentos e/ou Guias

- **Pelo bloco de pedido Slice ou próprio.**
- **Pelo site SliceLAB**

- Certifique-se de já estar com os arquivos necessários para fazer a solicitação: tomografia em formato DCM e escaneamento em formato STL.

**1º Passo:** acesse o site [www.slice.com.br/slicelab](http://www.slice.com.br/slicelab)

**2º Passo:** escolha sua opção que você se enquadra;

**3º Passo:** escolha "Endoguide 3D";

**4º Passo:** preencha todas informações solicitadas e envie os arquivos solicitados.

Pronto! Agora é só aguardar nosso contato para finalização da sua solicitação.

Desejamos excelentes exames.

 Esclareça suas dúvidas via Whatsapp: (31) 2537-2787

**Slice** LAB